

Nome do produto Curativo intraoral

Finalidade

É usado para proteger a ferida oral, formando uma barreira física sobre a mesma.

Características & Benefícios (Características de Desempenho)

Este produto é um material de proteção livre de eugenol aplicado nas feridas intraorais.

1. Protege feridas orais
2. Reduz a dor causada pela irritação da ferida oral
3. Utiliza polímero hidrofílico para adesão
4. Autoadesivo com saliva

Indicações de utilização

O curativo de feridas intraorais destina-se ao cuidado de todos os tipos de feridas orais, lesões e ulcerações da mucosa gengival e oral, incluindo estomatite, úlceras leves e traumáticas, escoriações causadas por aparelhos e dentaduras inadequadas, e lesões associadas à cirurgia oral. O curativo de feridas intraorais funciona para aliviar a dor aderente e protegendo os tecidos afetados de uma maior irritação, permitindo assim a cicatrização.

Como utilizar

- Preparação
 1. Verifique se existe contaminação do produto, danos na embalagem e confirme a data de validade.
 2. Por favor leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar o produto.
(A presença de algumas bolhas no produto deve-se ao processo de fabricação do mesmo, não comportando qualquer risco de segurança)
- Instruções
 1. Irrigue a ferida com solução estéril ou solução salina.
 2. Corte o produto com a forma e tamanho adequados.
 3. Remova levemente a humidade da ferida com gaze. Uma exsudação excessiva pode reduzir a força adesiva e tempo de utilização do produto.
 4. Remova o papel antiadesivo transparente e aplique o curativo na ferida.
 5. Pressione suavemente o produto por 5 a 10 segundos enquanto o mesmo adere à ferida.
(De acordo com as circunstâncias, pressione repetidamente)

Contra-indicações

1. Não utilize o produto se este parecer danificado ou contaminado antes de usar.
2. Não use em feridas profundas com sangramento excessivo.

PRECAUÇÕES

⚠ Este dispositivo médico é para uma única utilização. Se reutilizado, o produto pode causar infecção, infecção cruzada e inflamação. Este produto deve ser descartado de acordo com o regulamento de descarte de cada autoridade competente.

1. Por favor leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar o produto.
 2. Se sentir algum inchaço, reação alérgica, dor de estômago ou qualquer sintoma de infecção, consulte o seu médico.
 3. Não é aconselhável remover o adesivo com força, o lado adesivo dissolve e cairá por si próprio.
 4. Remova a superfície protetora solta.
 5. O tempo de fixação do produto pode diminuir quando estimulado pela língua ou alimentos.
- Um aviso ao usuário e / ou paciente de que qualquer incidente grave que ocorra em relação ao produto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o usuário e / ou o paciente está estabelecido;

Armazenamento

1. Armazenar no interior (1 °C ~ 35 °C) em local limpo.
 2. Manter afastado do fogo, da luz solar direta e de ambientes de elevada temperatura.
 3. Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto pode endurecer, dependendo do método de armazenamento e manipulação.
 - A presença de algumas bolhas na superfície da tira deve-se ao processo de fabricação do mesmo, não comportando qualquer risco de segurança

Perfil do paciente

Pacientes que precisam de um curativo para proteger feridas intraorais

Usuário do dispositivo

Profissional da saúde

 TBM Corporation. B-301, Gwangju High-tech Center, 313, Cheomdangwagi-ro, Buk-gu, Gwangju, 61008, Korea. Tel : +82-62-971-2845 Fax : +82-62-971-2815

Website: www.tbmkorea.com (O manual do utilizador pode ser descarregado da página inicial.)

 Emergo Europe B.V. Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Número do modelo OB23, OB53

* Este produto deve ser descartado de acordo com a regulamentação de eliminação de resíduos aplicável.

Descrição dos símbolos

	Número do modelo		Número de lote		Fabricante
	Data de fabrico		Validade		Não reutilizar
	Cuidado / Atenção		Limite de temperatura de armazenamento e transporte		Mantenha afastado da luz solar
	Consulte as instruções de utilização		Não use se a embalagem estiver danificada		Representante autorizado na comunidade europeia
	Marcação CE		Certificado GMP		Identificador único do dispositivo
	Aparelho Médico		Apenas por receita médica		